




UrgoK2



* Cicatriser avec vous, pour vous.

Aujourd'hui la compression c'est encore trop souvent :

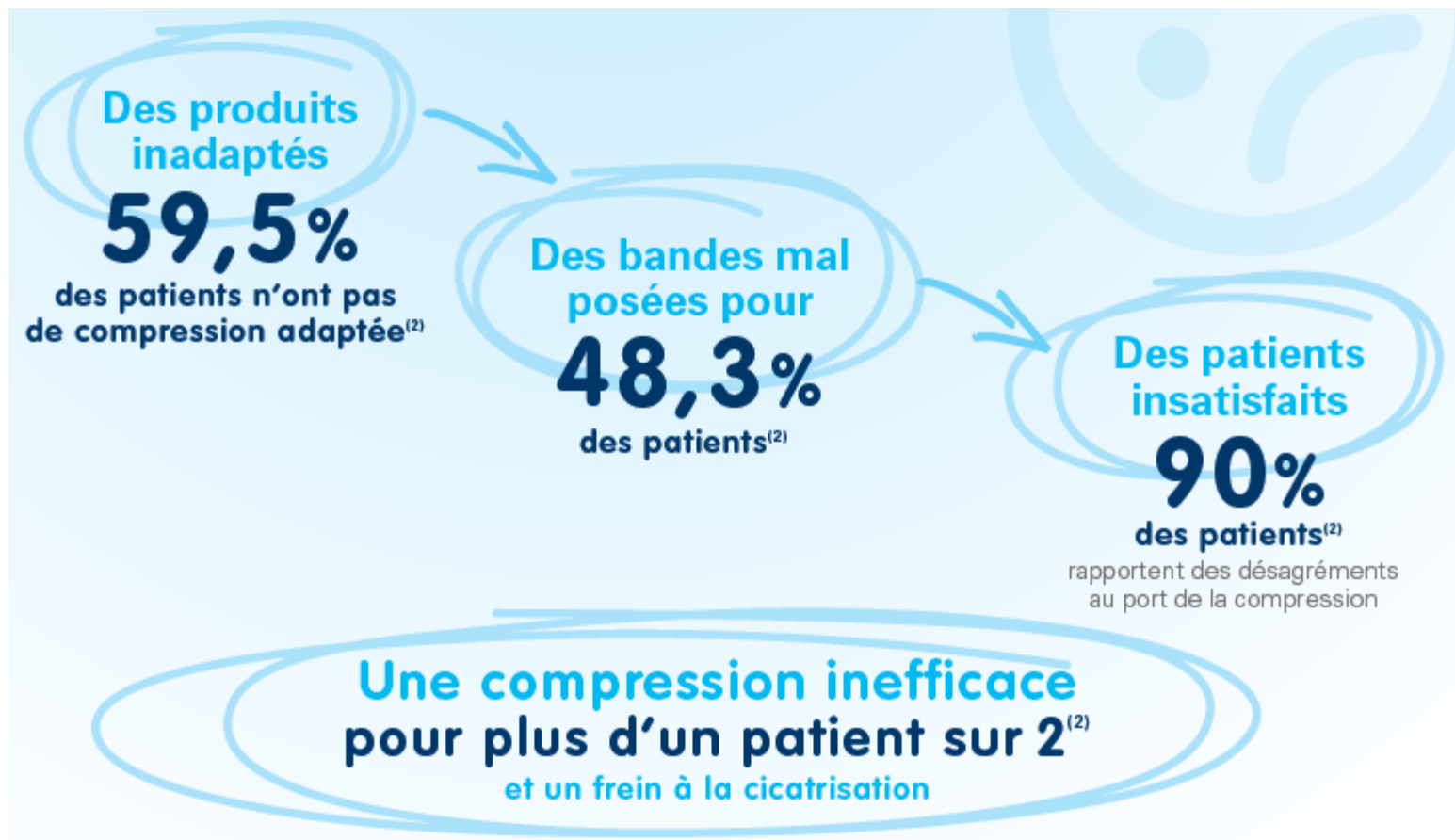


(2) Stansal A. *et al.* Compression therapy in 100 consecutive patients with venous leg ulcers. *J Mal Vasc.* 2013; 38(4):252-8.



UrgoK2

traitement compressif des ulcères veineux, oedèmes associés et du lymphoedème

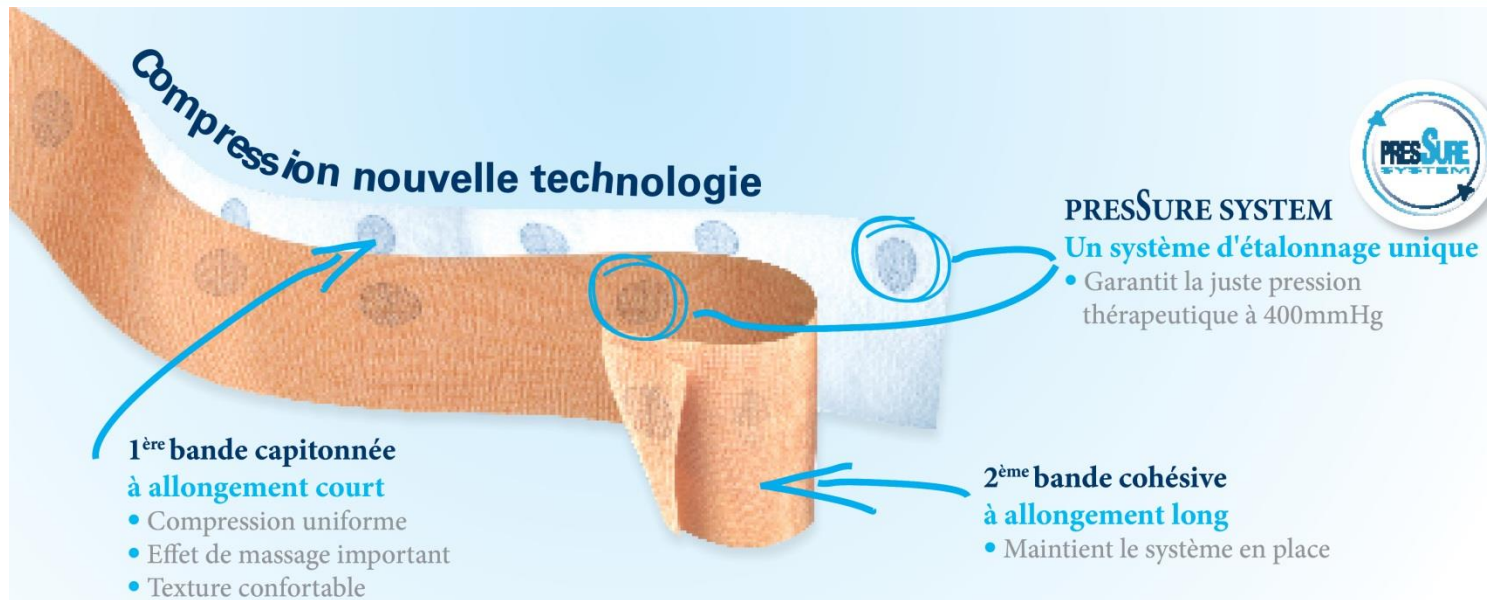

UrgoK2
Existe en kit 18-25 cm et 25-32 cm
pour s'adapter à tous vos patients



UrgoK2 traitement indiqué en 1^{ère} intention en cas d'ulcère associé à l'œdème

DES RECOMMANDATIONS CLAIRES

En 1^{ère} intention

Systèmes de bandages multitypes

Recommandation HAS⁽¹⁾



Type
UrgoK2

Jusqu'à cicatrisation complète



HAS

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

COMMISSION NATIONALE D'ÉVALUATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
ET DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ

AVIS DE LA COMMISSION

15 mai 2012

Avec les autres systèmes de compression multicouche, URGO K2 se place au premier rang de la stratégie thérapeutique de l'ulcère veineux de jambe.

(1) Bon usage des technologies de santé. La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS décembre 2010.



Etude
Benigni

UrgoK2


Efficace sur la cicatrisation

Efficacité équivalente au
système multitype 4 bandes⁽⁵⁾


Etude
Odyssey

Etude clinique multicentrique chez 42 patients porteurs d'ulcères veineux⁽⁴⁾

Critère principal : Réduction de surface des ulcères
au cours des 6 semaines de traitement⁽⁴⁾

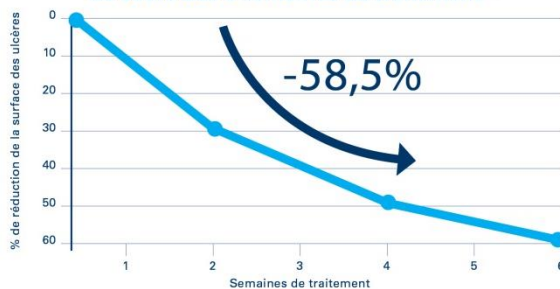

Réduction du pourcentage
de l'œdème après 6 semaines de traitement⁽⁴⁾

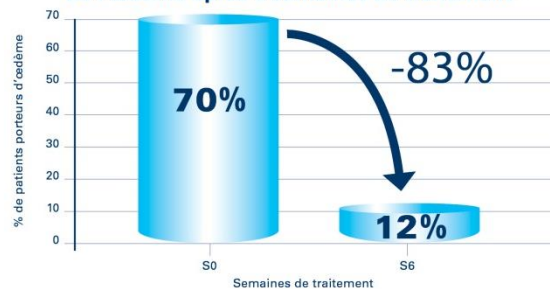

(4) Benigni J-P *et al.* Efficacy, safety and acceptability of a new two-layer bandage system for venous leg ulcers. *J Wound Care.* 2007; 16(9): 385-390.

(5) Lazareth I. *et al.* Efficacy of two compression systems (UrgoK2 vs Profore) in the local management of venous leg ulcers: results of a european randomized clinical trial. *J Wound Care.* 2012; 21(11) : 553-4, 556, 558.



UrgoK2

Une efficacité démontrée en clinique

Etude clinique multicentrique contrôlée et randomisée contre le système multitype de référence Profore chez **186 patients** porteurs d'ulcères de jambe veineux

Etude
Odyssey

Cicatrisation complète à S12 :
en % de patients

44,1 % avec UrgoK2

versus 38,7 % avec Profore (ns)

Lazareth I. *et al.* Efficacy of two compression systems (UrgoK2 vs Profore) in the local management of venous leg ulcers: results of a european randomized clinical trial. *J Wound Care.* 2012; 21(11) : 553-4, 556, 558.



URGO
MEDICAL
HEALING PEOPLE®

Compression fiable et sûre




- La juste pression thérapeutique de 40 mmHg

Pose sans erreur et facile

- Sans entraînement
- Dès la 1^{ère} application

Pourcentage d'infirmières ayant réalisé le niveau de pression thérapeutique requis (30-50 mmHg)⁽³⁾

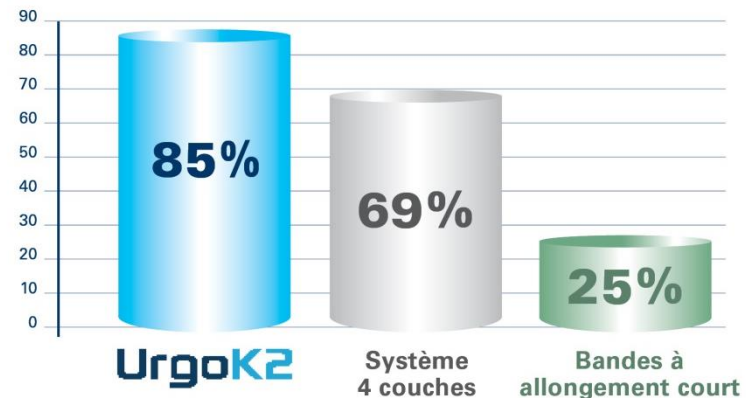

(3) Hanna R. *et al.* A comparison of interface pressures of three compression bandage systems. *British Journal of Nursing*, 2008; 17(20) Tissue Viability Supplement: S16-24.

I. CHOISIR LA BONNE TAILLE DE CHEVILLE

Prise en compte des variations interindividuelles



II. RÉALISER LE BON ÉTIREMENT

L'étalonnage des bandes permet de visualiser le degré correct d'étirement



Bande non étirée



Bande correctement étirée

III. APPLIQUER LE BON RECOUVREMENT

L'étalonnage des bandes permet de visualiser le niveau correct de recouvrement (l'étalonnage est juste masqué)



50 % de recouvrement



2/3 du recouvrement



**PRESSIION THÉRAPEUTIQUE RECOMMANDÉE
SYSTÉMATIQUEMENT ATTEINTE**

II. APPLICATION DE LA 1^{ère} BANDE :



1. Appliquer la **1^{ère} bande KTECH** à la base des orteils en faisant deux tours d'ancrage sans étirer. Le motif d'étalonnage doit se situer vers le haut de la jambe (Kit 18-25 cm).



2. Continuer en faisant une figure en "8" autour de la cheville en étirant la bande jusqu'à ce que **l'ellipse devienne un cercle**. Veillez à bien recouvrir le talon.



3. Remonter jusqu'au genou en effectuant des spirales. **Le motif de l'étalonnage de la spire précédente doit tout juste être recouvert par la spire suivante**, et toujours en étirant jusqu'à ce que **l'ellipse devienne un cercle**.

4. Finir un doigt sous le genou, couper l'excédent de bande éventuel et sécuriser avec un sparadrap.

III. APPLICATION DE LA 2^{ème} BANDE KPRESS :



1. Appliquer **KPRESS** au-dessus de **KTECH** selon la même technique :

- en commençant un doigt au-dessus de **KTECH**
- et en finissant un doigt sous **KTECH** afin que seul **KTECH** soit en contact direct avec la peau.

2. Couper l'excédent de bande éventuel et appuyer doucement les mains sur **KPRESS** pour assurer une bonne adhérence sur elle-même et donc une bonne tenue du système.



UrgoK2

un traitement compressif qui facilite l'observance des patients

UrgoK2

la compression appréciée et portée

- Confort jour et nuit⁽⁴⁾



Durant la journée



Durant la nuit

*Patients jugeant le confort "bon" ou "très bon"

UrgoK2

la compression facile



Meilleure mobilité de la cheville



Chaussage facile



(4) Benigni J-P *et al.* Efficacy, safety and acceptability of a new two-layer bandage system for venous leg ulcers. *J Wound Care.* 2007; 16(9): 385-390.

UrgoK2

traitement compressif des ulcères veineux, oedèmes associés et du lymphoedème

UrgoK2

**1^{er} système de compression
multitype en 2 bandes seulement**

- Recommandé en 1^{ère} intention par la HAS⁽¹⁾
- Peut rester en place jusqu'à 7 jours⁽⁶⁾
- Pose sécurisée et facile
- Confort des patients avec seulement 2 bandes

UrgoK2

**Existe en kits 18-25 cm et 25-32 cm
pour s'adapter à vos patients**



UrgoK2



TAILLE DE CHEVILLE	LARGEUR DE BANDES	CODE ACL
18 - 25 cm	10 cm	34010.967.457.9.5
25 - 32 cm	10 cm	34010.967.458.5.6

Existe aussi en largeur 8 cm et 12 cm

UrgoK2 Latex Free



TAILLE DE CHEVILLE	LARGEUR DE BANDES	CODE ACL
18 - 25 cm	10 cm	34010.206.449.3.4
25 - 32 cm	10 cm	34010.206.448.7.3



URGO
MEDICAL
HEALING PEOPLE®